

En cas de questions, notre service à la clientèle se tient volontiers à votre disposition.

9.05ch.925604 - Ostschweiz Druck pharmacom

## Vous remplacez un NovoPen®3 par un NovoPen®4?



NovoPen®3



Novo Nordisk Pharma AG  
Untere Heslibachstrasse 46  
8700 Küsnacht/ZH

[www.novonordisk.ch](http://www.novonordisk.ch)  
[www.novonordisk.com](http://www.novonordisk.com)



**NovoPen®4**  
Le bon choix



**NovoPen®4**  
Le bon choix

## Quelles sont les principales différences entre NovoPen®4 et NovoPen®3?

- Pour sélectionner la dose avec le NovoPen®4, il faut tirer le bouton sélecteur de dose – lors de doses élevées, l'injection est plus facile et une application contrôlée et sûre est garantie.
- Avec le NovoPen®4, l'administration de l'insuline nécessite 50% de pression en moins.
- Pour une lecture plus aisée, NovoPen®4 possède, par rapport au NovoPen®3, un affichage de la dose trois fois plus grand.
- Pour sélectionner la dose, on peut tourner dans les deux sens – pas de blocage lors du revissage, donc lors de la correction de la dose.
- Il n'est pas possible de sélectionner une dose plus élevée que la quantité d'insuline présente dans l'ampoule Penfill®.
- Le NovoPen®4 émet un clic audible après chaque administration d'une dose – ce clic confirme l'administration correcte et complète de l'insuline.
- Le piston peut être remis à la position initiale par une simple pression sur la tête du piston. Le NovoPen®4 émet un clic audible lorsque la tête du piston se remet en place correctement. Il n'est plus nécessaire de le revisser.

Grâce à ces avantages, apprendre à utiliser le NovoPen®4 est plus simple et plus rapide.

## Informations générales

### Choix de la couleur

NovoPen®4 est disponible en bleu et en argenté




### Unités de dosage

- Dose minimale: 1 unité
- Dose maximale: 60 unités
- Intervalle entre les doses: 1 unité

### Aiguilles

Vous pouvez utiliser les mêmes aiguilles NovoFine® pour le NovoPen®4 que pour le NovoPen®3.

Les aiguilles du stylo ne doivent être utilisées qu'une seule fois: Les résidus d'insuline dans l'aiguille peuvent boucher l'aiguille et bloquer le stylo injecteur d'insuline. Des aiguilles émoussées peuvent être nettement plus douloureuses et entraîner des durcissements du tissu adipeux.

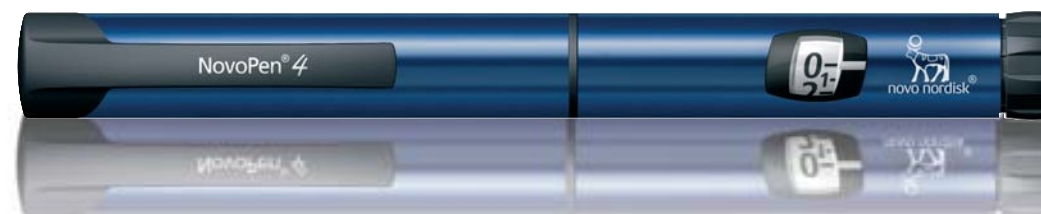

**NovoPen®4**  
Le bon choix