

Réceptacle de la cartouche Penfill®

Cartouche Penfill® 3 ml

Tige du piston Indicateur de dose



Fenêtre unités résiduelles

Echelle – unités résiduelles

Capsule colorée codée




Tête du piston

Affichage


Bouton sélecteur de dose




Capuchon du stylo

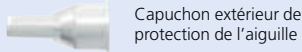


Capuchon extérieur de protection de l'aiguille

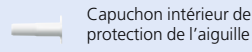

Capuchon intérieur de protection de l'aiguille

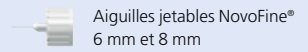


Aiguilles jetables NovoFine® 6 mm et 8 mm

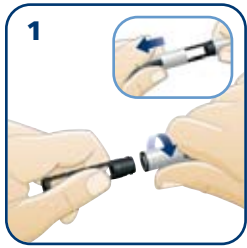

1

Préparation du NovoPen®4

Retirez le capuchon. Dévissez les éléments du NovoPen®4.

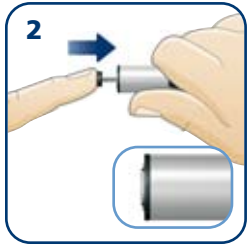

2

Faites rentrer la tige du piston jusqu'à ce qu'elle se bloque.




3

Insérez la cartouche Penfill® dans le réceptacle, en introduisant la capsule colorée codée en premier.



4

Vissez les éléments du NovoPen®4. Attention: Suspension d'insuline (l'insuline trouble) bien mélanger avant chaque emploi. Vissez une aiguille jetable NovoFine® neuve. Retirez les capuchons extérieur et intérieur de l'aiguille. Jetez le capuchon intérieur de l'aiguille.

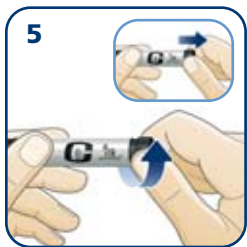

5

Contrôle de l'écoulement d'insuline (préparation pour l'injection)

Avant chaque injection, contrôlez que l'insuline s'écoule correctement. Tirez le bouton sélecteur de dose et faites-le tourner pour sélectionner:


- 4 unités avec une cartouche Penfill® neuve
- 1 unité avec une cartouche entamée



6

Maintenez votre NovoPen®4 en position verticale, aiguille pointée vers le haut.


Avec votre doigt, tapotez doucement le réceptacle de la cartouche afin que les bulles d'air remontent vers le haut.

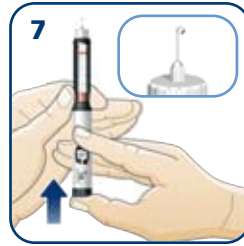

7

Appuyez à fond sur le bouton sélecteur de dose, jusqu'à ce que vous entendiez ou sentiez un déclic. L'afficheur revient à 0. Une goutte d'insuline doit apparaître au bout de l'aiguille.

Dans le cas contraire, répétez les étapes 5 à 7 jusqu'à l'apparition d'une goutte d'insuline.

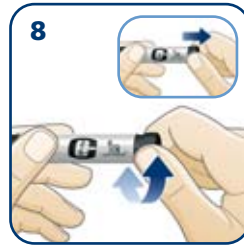


8

Sélection de la dose

Tirez le bouton sélecteur de dose et faites-le tourner jusqu'à ce que l'indicateur de dose indique le dosage correspondant.

Si vous avez sélectionné une dose incorrecte, faites tourner le bouton sélecteur de dose jusqu'à ce que l'indicateur de dose indique le dosage correct.

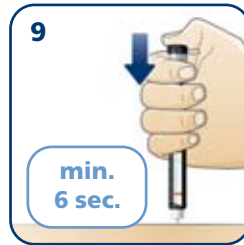

9

min. 6 sec.

Comment effectuer votre injection

Pour procéder à l'injection, appuyez à fond sur le bouton sélecteur de dose, jusqu'à ce que vous entendiez ou sentiez un déclic. Si vous le faites tourner, l'insuline ne sera pas injectée. Maintenez l'aiguille sous la peau au moins 6 secondes.

Aiguilles

- Nous recommandons d'utiliser le NovoPen®4 avec les aiguilles NovoFine® 6 mm et 8 mm
- Les aiguilles du stylo ne doivent être utilisées qu'une seule fois
 - Les résidus d'insuline dans l'aiguille peuvent boucher l'aiguille et bloquer le stylo injecteur d'insuline
 - Des aiguilles émoussées peuvent être nettement plus douloureuses et entraîner des durcissements du tissu adipeux



A

Environ 150 unités restantes

Remplacement de la cartouche Penfill® Si la cartouche est presque vide

Le réceptacle de la cartouche Penfill® est gradué d'une échelle qui indique le nombre approximatif d'unités restantes, voir illustration A. N'utilisez pas cette échelle pour mesurer la quantité d'insuline à injecter.



B

L'indicateur de dose indique le nombre d'unités restantes

Si la cartouche contient moins de 60 unités, vous pouvez connaître le nombre exact d'unités restantes en consultant l'affichage. Pour cela, tirez le bouton sélecteur de dose (s'il n'est pas déjà sorti) et faites-le tourner jusqu'à ce qu'il se bloque. L'indicateur de dose indique le nombre d'unités restantes, voir illustration B. Si l'indicateur de dose se trouve entre deux traits, réglez-le sur le trait inférieur.

Veuillez vous reporter à la notice d'emballage pour de plus amples renseignements.

NovoPen® 4
Le bon choix